

EQUA polstrite hooldusjuhend



Puhastamine:

Polstrite puhastamiseks kasuta niisket mikrokiud lappi. Vajadusel kasutada puhastusvahendit, mis on neutraalne või kergelt aluseline. PH 7-9. Pritsi vesi või pesulahus lapile ja pühi polstri pind puhtaks. Tugevamate plekkide eemaldamiseks pritsi pesulahus otse plekile, laske 5 minutit ainel mõjuda ja pühi lapiga pind kuivaks. Ära kasuta märga puhastusmeetodit, polstrite õmblused ei ole veekindlad ja märg puhastus võib tekitada pöördumatuid kahjustusi. Polstrite puhastamisel pole soovitatav kasutada abrasiivseid tooteid (kare nuustik, hõõrumisplaat jne), see võib kahjustada polstri pindasid. **Ära kasuta alkoholi või lahusti baasil olevaid puhastusvahendeid!**

Hooldus: EQUA polstrid ei vaja hooldusvahendeid. Kindlasti ei tohi polstri hooldamiseks kasutada silikooni sisaldavat hoolduvahendit.



Lembitu 8, Tartu 50406

Tel. 7 384 444

www.equa.ee

info@equa.ee